



产品注册号: 详见公司网站www.jmsdl.com





立足于人与医疗之间...

The Bridge to Good Health Care

一次性使用动静脉穿刺针

A.V.Fistula Needle Sets

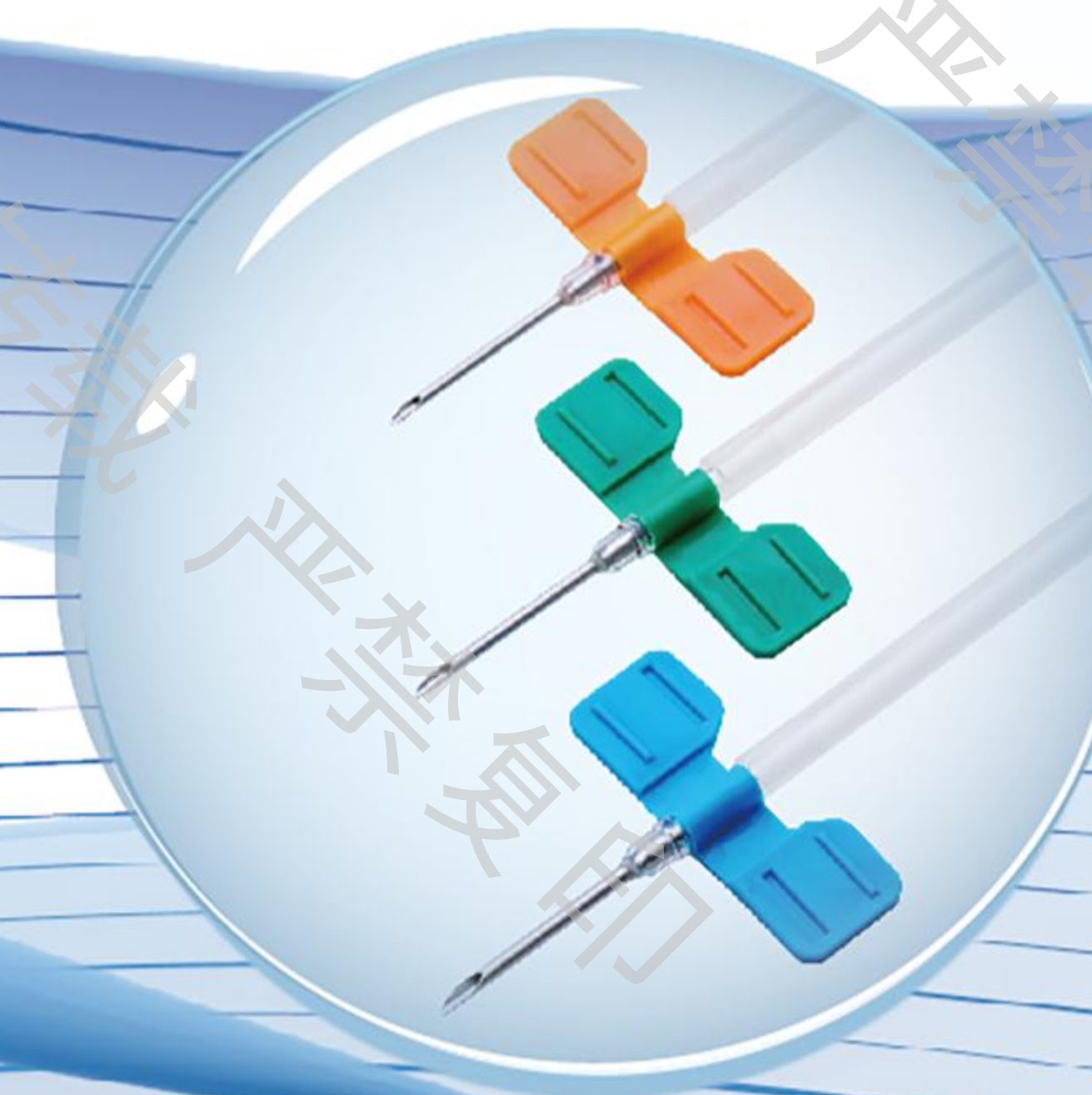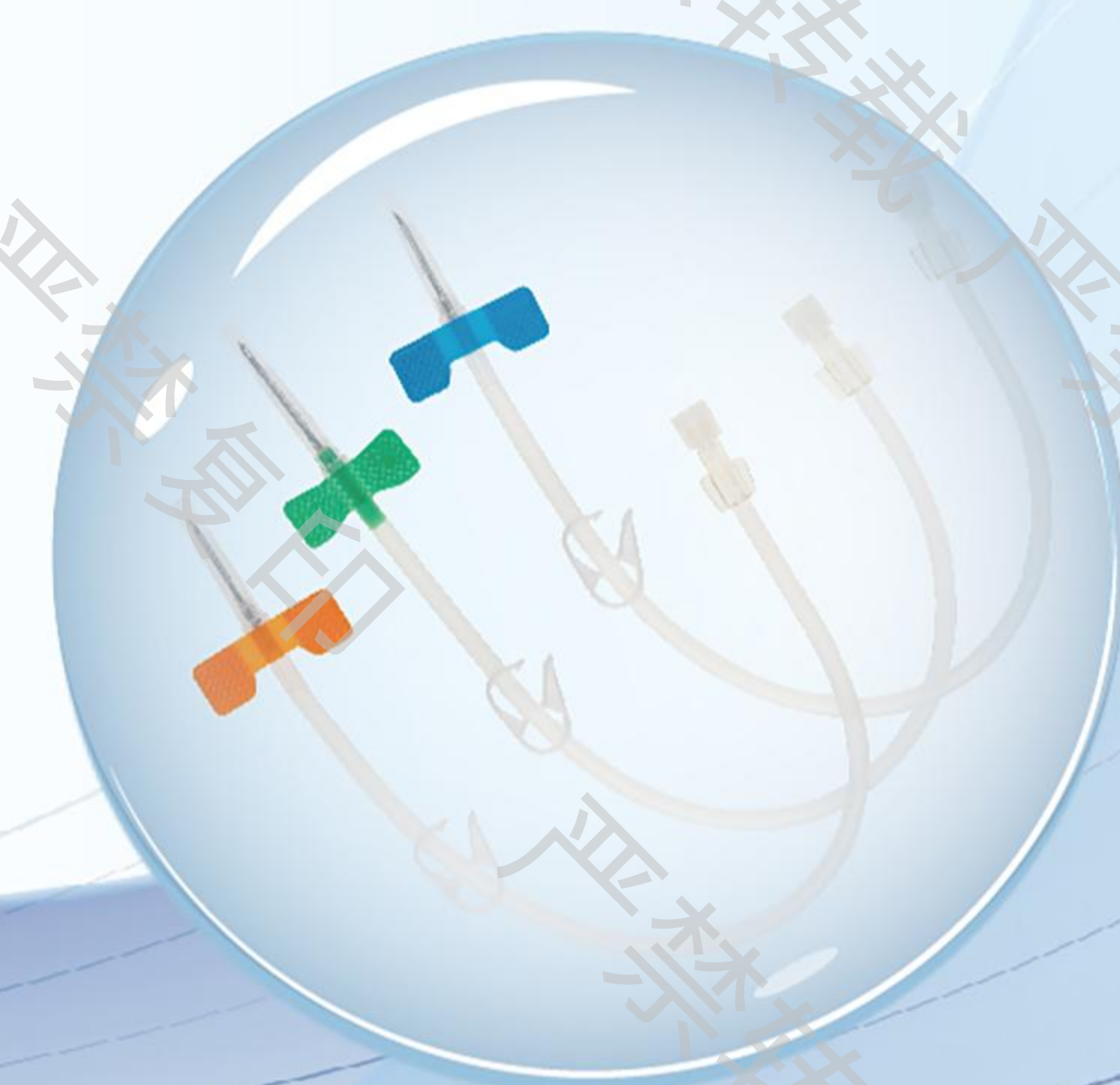

大连JMS医疗器具有限公司

地址: 中国辽宁省大连经济技术开发区黄海西路25号
电话: 0411-87611733 (总机) 87611734 (销售)

北京分公司

地址: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼302室
电话: 010-68288395

分类号D-3123M0801-F
修订号:A
印刷日: 2023年11月





透析领域
Dialysis Field

JMS血液净化系统

大连JMS医疗器具有限公司成立于1988年，在中国研发、生产和销售血液净化用穿刺针30余年时间，具有先进的针尖研磨、自动化组装、检验等工艺，每年为中国及全球市场提供数以亿计的优良产品。同时提供中央集中供液系统、持续性血液净化装置、以及配套用体外循环管路的生产和销售。

- ◎ 中央集中供液系统 (CDDS)，为透析患者提供超纯透析体验
- ◎ 多功能血液净化装置 (55X)，实现血液净化领域多种治疗模式

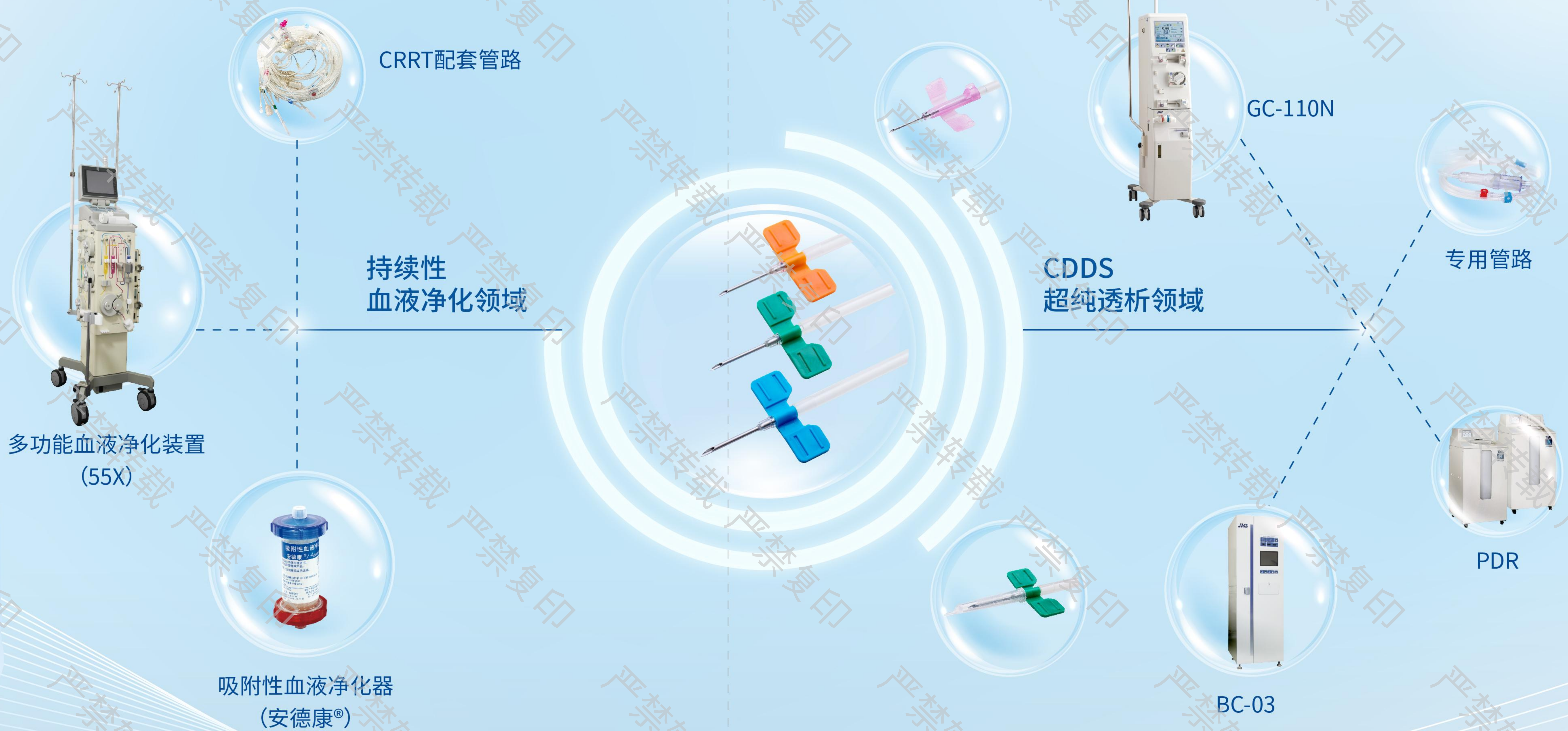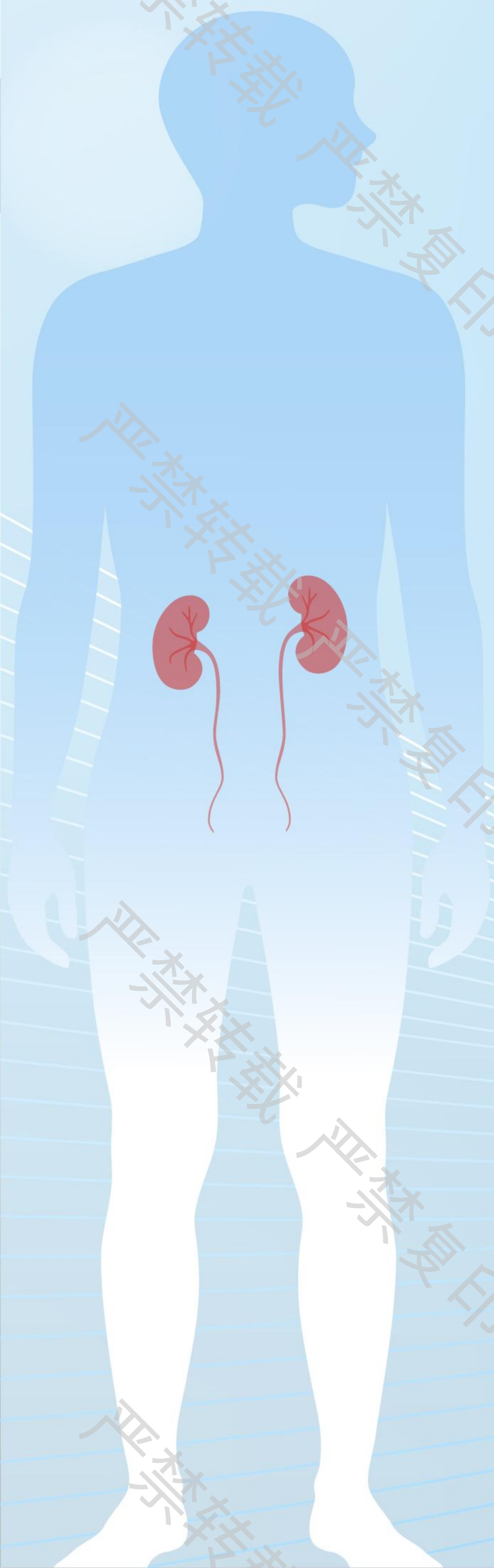

01

普通式穿刺针


产品特点

针尖:锋利、背孔细长

- » 精选超薄壁针管,应用特殊研磨工艺,使穿刺时阻力更小,有效避免对皮肤及血管的损伤。
- » 细长背孔的独特设计,使背孔位置更靠近针尖,有效防止血液向组织渗透。
- » 背孔面积大,有效增大血液流速,减少血液阻力;

翼片:防滑设计

- » 凹凸锁扣的防滑设计,使用者在穿刺时能够更稳定的捏住翼片,有效控制穿刺角度和力度。
- » 根据临床操作需要,提供固定翼片和回转翼片的不同规格。
- » 在透析过程中,回转翼片不动的情况下,通过旋转软管的方式,可轻松控制皮下针管刃面方向(红点=刃面朝下;黑点=刃面朝上);

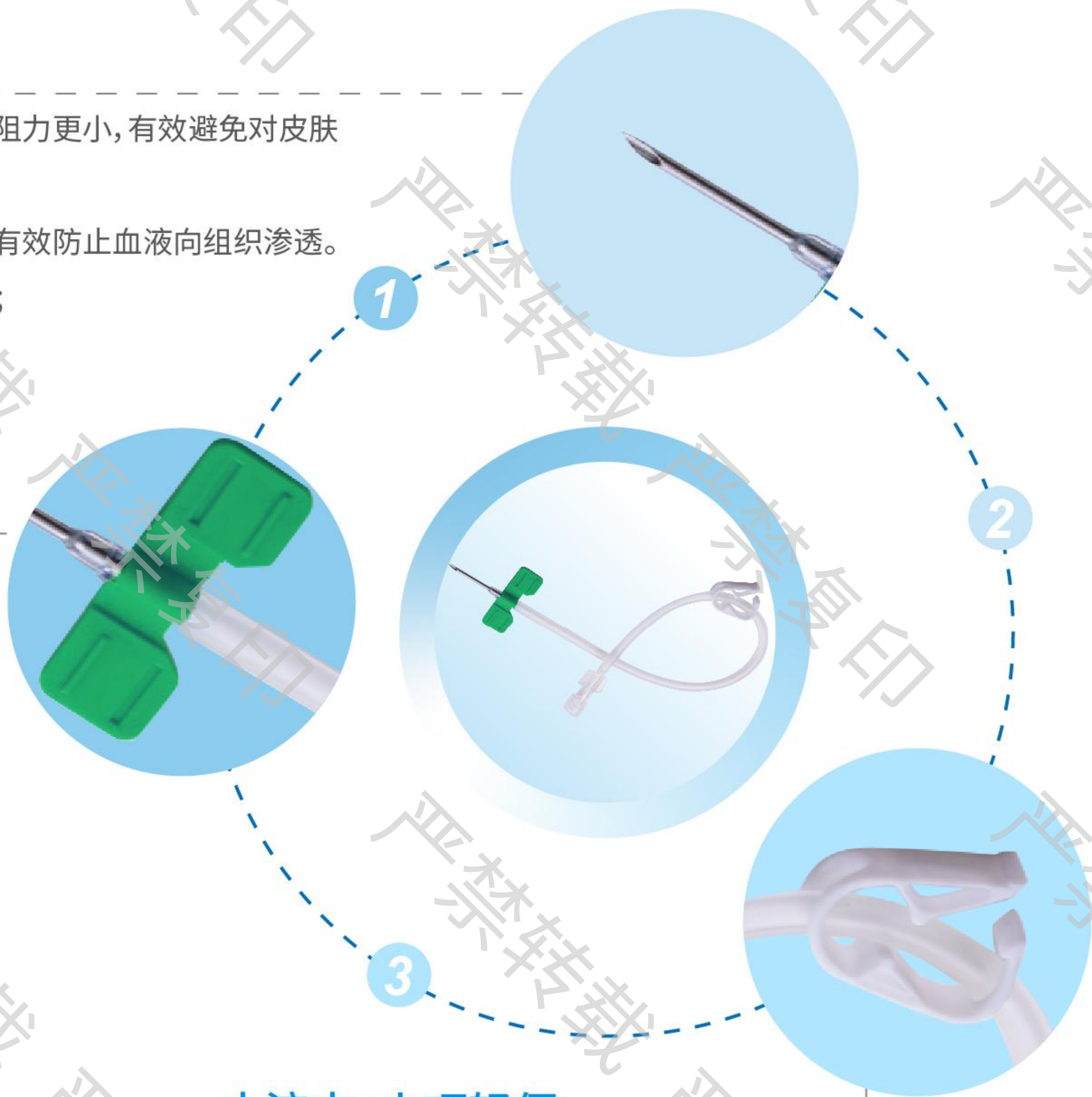

止流夹:小巧轻便

产品规格一览

区分	规格/型号	针柄类型	包装方式
18G	1.2×25	F:固定翼片 R:回转翼片	S:单支装=500支/箱 D:双支装=400对/箱
17G	1.4×25 1.4×32	F:固定翼片 R:回转翼片	S:单支装=500支/箱 D:双支装=400对/箱
16G	1.6×25 1.6×32	F:固定翼片 R:回转翼片	S:单支装=500支/箱 D:双支装=400对/箱
15G	1.8×25	F:固定翼片 R:回转翼片	S:单支装=500支/箱 D:双支装=400对/箱

①根据排版情况,针柄类型、包装方式,都可以排列在一行
②区分,必须有底纹颜色。

02

钝型穿刺针(扣眼穿刺专用)


产品特点

专为扣眼穿刺法设计,圆滑针尖,不易损伤皮下隧道和血管瓣

- » 有效提高穿刺成功率,减轻患者疼痛感
- » 降低穿刺点渗血的发生
- » 降低血栓、血管瘤发生率,有效保护内瘘,延长内瘘使用寿命
- » 专用无菌血痂去除器,设计独特,使血痂剥离更快捷更安全,痛感更小



操作方法

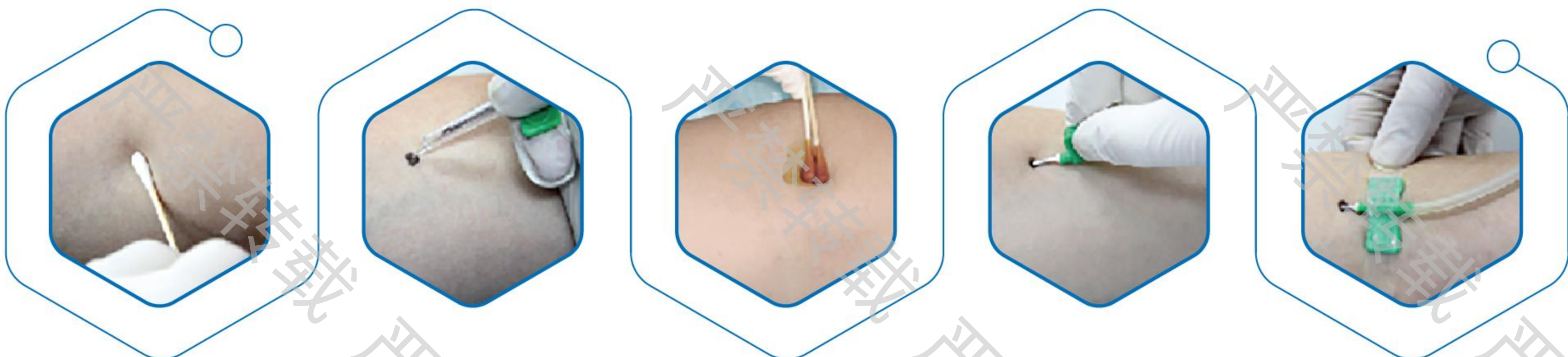

01

软化血痂

02

用无菌血痂去除器迅速便捷的剥离血痂

03

对穿刺点进行再消毒

04

手持翼片,从扣眼处轻轻推进。如遇阻力可慢慢捻转针头,顺着皮下隧道滑入血管

05

穿刺完成,用胶带固定

产品规格一览

区分	规格/型号	针柄类型	包装方式
17G	1.4×25	F:固定翼片 R:回转翼片	S:单支装=500支/箱 D:双支装=400对/箱
16G	1.6×25	F:固定翼片 R:回转翼片	S:单支装=500支/箱 D:双支装=400对/箱

03 安全式穿刺针

产品特点

- 防止误穿刺几率,有效确保医护人员和患者的安全
- 降低感染风险,特别在阳性区推荐使用
- 根据翼片不同,分为锁扣式(回转翼)和吃翼式(固定翼)两种规格



产品规格一览


区分	规格/型号	针柄类型	包装方式
18G	1.2×23	R:回转翼片	S:单支装=500支/箱
	1.2×25	F:固定翼片	D:双支装=400对/箱
17G	1.4×23	R:回转翼片	S:单支装=500支/箱
	1.4×25	F:固定翼片	D:双支装=400对/箱
16G	1.6×23	R:回转翼片	S:单支装=500支/箱
	1.6×25	F:固定翼片	D:双支装=400对/箱

锁扣式 SysLoc MINI


穿刺



回拉

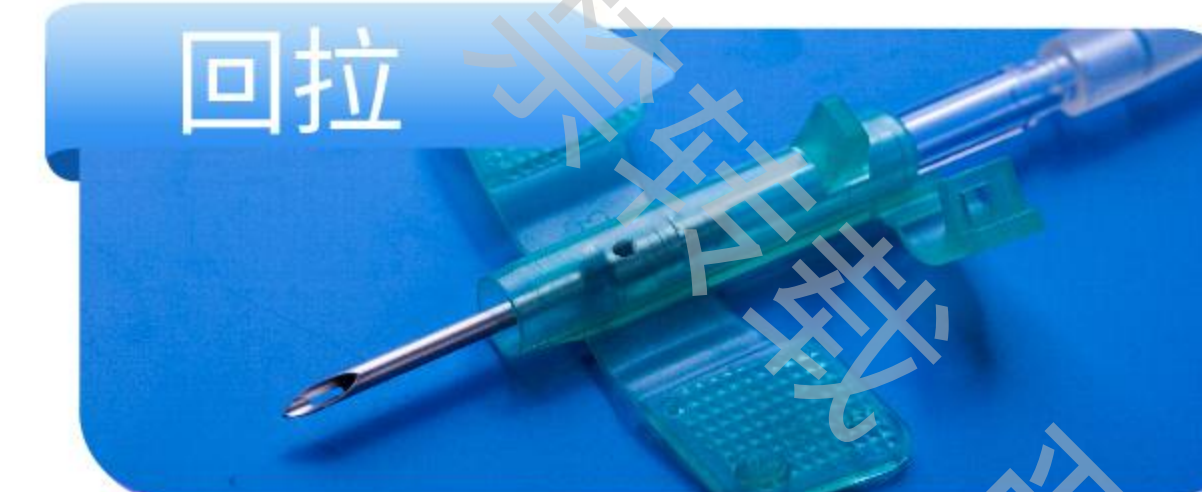

紧锁

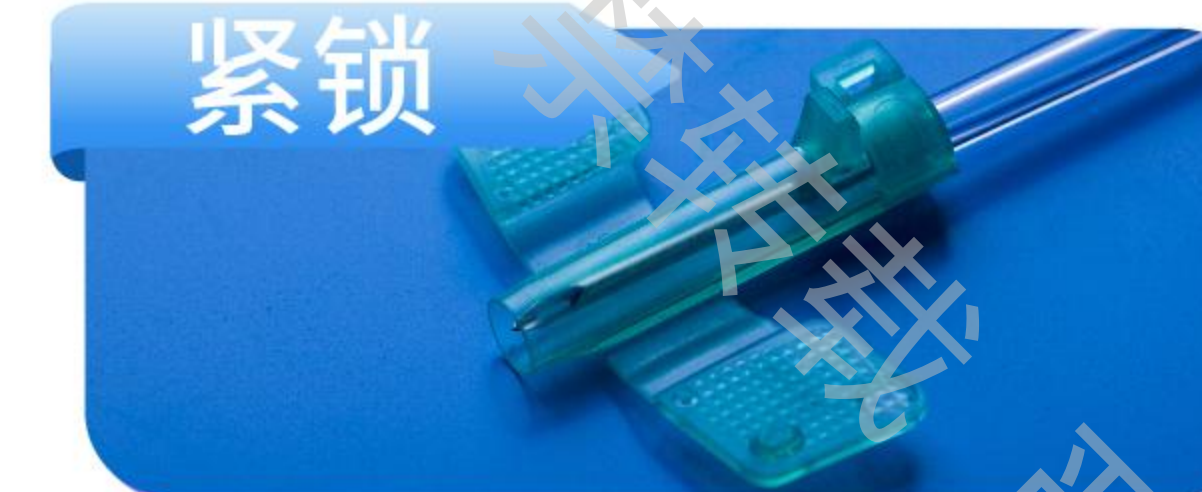

单手操作



1 单手拇指和食指按住锁扣。



2 打开锁扣。



3 食指顶住锁扣上面的凸起,拇指和中指向后拉动软管。



4 随着针管收回到针基内直至听到“咔”的锁紧声,表示针管完全收回。将穿刺针移开,并妥善处置。

双手操作



1 一只手的拇指和食指按住锁扣,另一只手的食指按住穿刺针翼片中指按住穿刺点。



2 打开锁扣。



3 一只手的拇指和食指向后拉动软管,另一只手仍按住翼片和穿刺点。



4 随着向后拉动软管,针收回到针基内直至听到“咔”的锁紧声表示针管完全收回,将穿刺针移开,并妥善处置。

吃翼式 Wing Eater

穿刺



回拉



紧锁



单手操作



1 推动保护盒,直至接触翼片。



2 一只手的中指按压穿刺处,食指抵住保护盒上盖凸起处。另一只手向后拉动软管。



3 稳定迅速的向后拉动软管,直至钢针全部收回到保护盒内。



4 将收入保护盒的穿刺针从穿刺点移开,并妥善处置。

双手操作



1 由患者按压穿刺处,操作者推动保护盒,直至接触翼片。



2 由患者按压穿刺处,操作者一只手握着保护盒尾部凹槽另一只手向后拉动软管。



3 稳定迅速的向后拉动软管,直至钢针全部收回到保护盒内。



4 将收入保护盒的穿刺针从穿刺点移开,并妥善处置。