




规格参数	
产品重量	约120g
最大血液流量	600mL/min
主体预充量	42mL
热交换部材质	不锈钢
外壳材质	聚碳酸酯
除泡部	聚酯纤维过滤网孔径120μm
血液侧接口尺寸	Ø 1/4" (6.4mm)
其他	内藏自动排气过滤器
最大使用压力	热交换水侧:233kPa 血液侧: 66kPa
包装数量	3套/箱

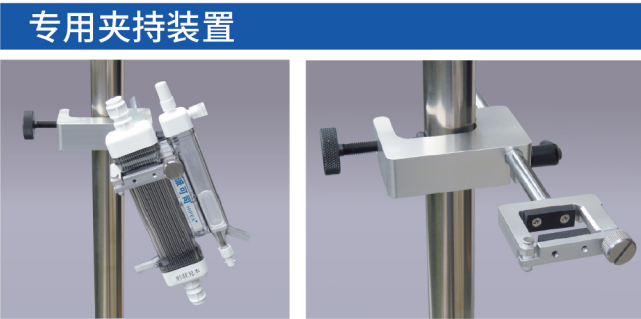

禁忌内容或者注意事项详见说明书

大连JMS医疗器具有限公司
地址:辽宁省大连经济技术开发区黄海西路25号
电话:0411-87611733 (总机) 87611734 (销售)

北京分公司
地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼302室
电话:010-68288395

公司公众号:大连JMS医疗器具有限公司
公司网站:www.jmsdl.com



产品注册证号:国械注准20233101866
广告审批号:辽械广审(文)第281204-07624号

分类号:D-3123F2801-F
修订号:D
印刷日:2025年2月



立足于人与医疗之间...
The Bridge to Good Health Care

海派可司®
HIPEX®



一次性使用
心脏停跳液灌注器



通过高效的热交换性能和低预充量
可以应对各种冷却和加温的需求

产品规格全

提供数百种管路规格，满足临床不同灌注方式及习惯。

变温能力强

具有极佳的变温性能，可以满足晶体灌注及含血灌注等各种需求。

预充量小

精心设计的紧凑结构，主体预充量仅42ml。

血液损伤少

合理的血液流路。良好的血液相容性。


除泡能力好

内置120 μ m聚酯纤维过滤网，及灌注液出口上端排气设计，保证进入心脏血液的安全。


海派可司® A型停跳液灌注器




- » 迎合该类产品**升级趋势**
- » 契合未来手术中**不断提升的灌注要求**
- » **A型停跳液灌注器**目前在欧美、日本等海外市场**广泛使用**

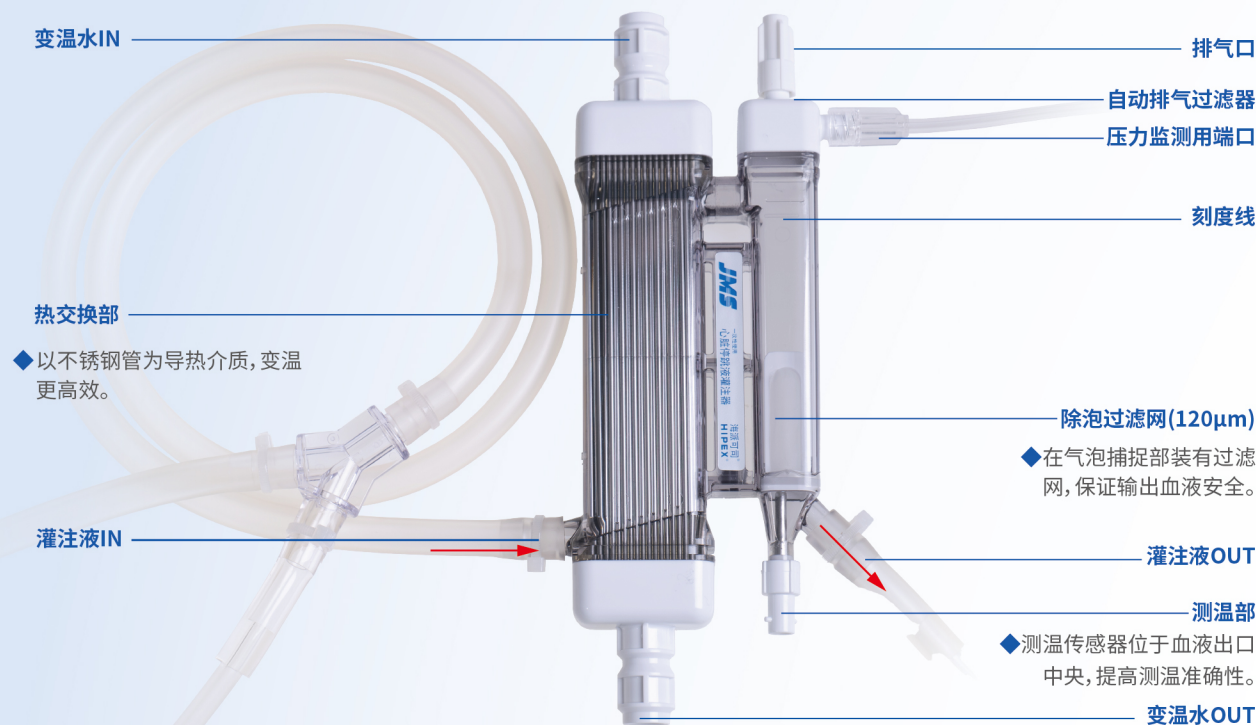

热交换性能

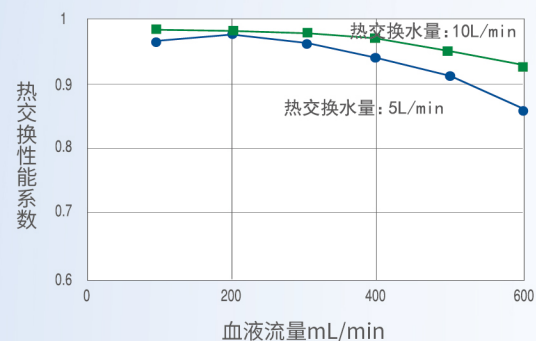


压力损失

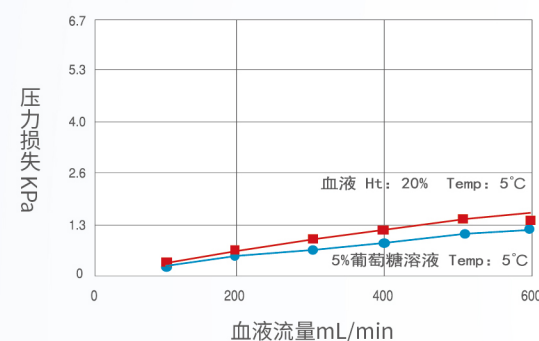


规格齐全




Buckberg's 含血停搏液灌注 (血液:晶体 = 4:1)

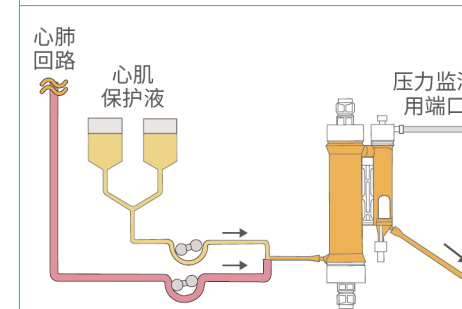

del Nido 含血停搏液灌注 (血液:晶体 = 1:4)

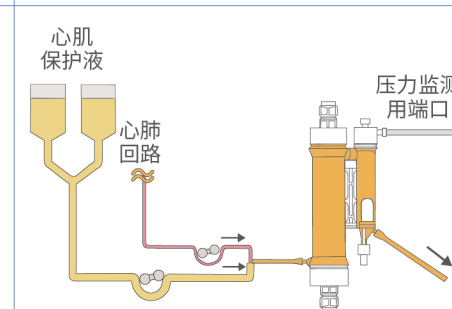

晶体停搏液灌注

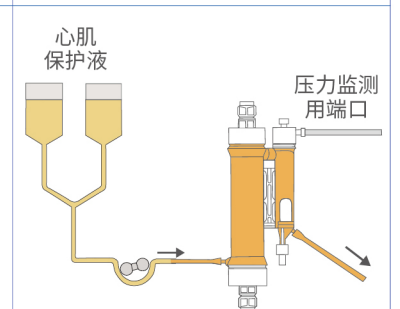

血液·心肌保护液 连接示意图

基础规格	灌注方式	点滴筒	取血药管 (mm)	台上管样式	台上管长度 (mm)	测压管长度 (mm)	备用管长度 (mm)
H-KN17S201314-217	Buckberg's 含血4:1	无	1700	单管	2000	1300	1400
H-DN17S201314-517	del Nido 含血1:4	无	1700	单管	2000	1300	1400
H-TN17S201314-817	晶体灌注	无	1700	单管	2000	1300	1400

规格多样，可根据点滴筒配置、台上管样式及各管路长度进行选择。如需其他规格，请与厂家联系。